


# Ablaufschema Covid-19 Speicheltest (Saliva-Test)

Dieses Ablaufschema unterstützt Sie bei der Durchführung eines Corona-Speicheltestes.

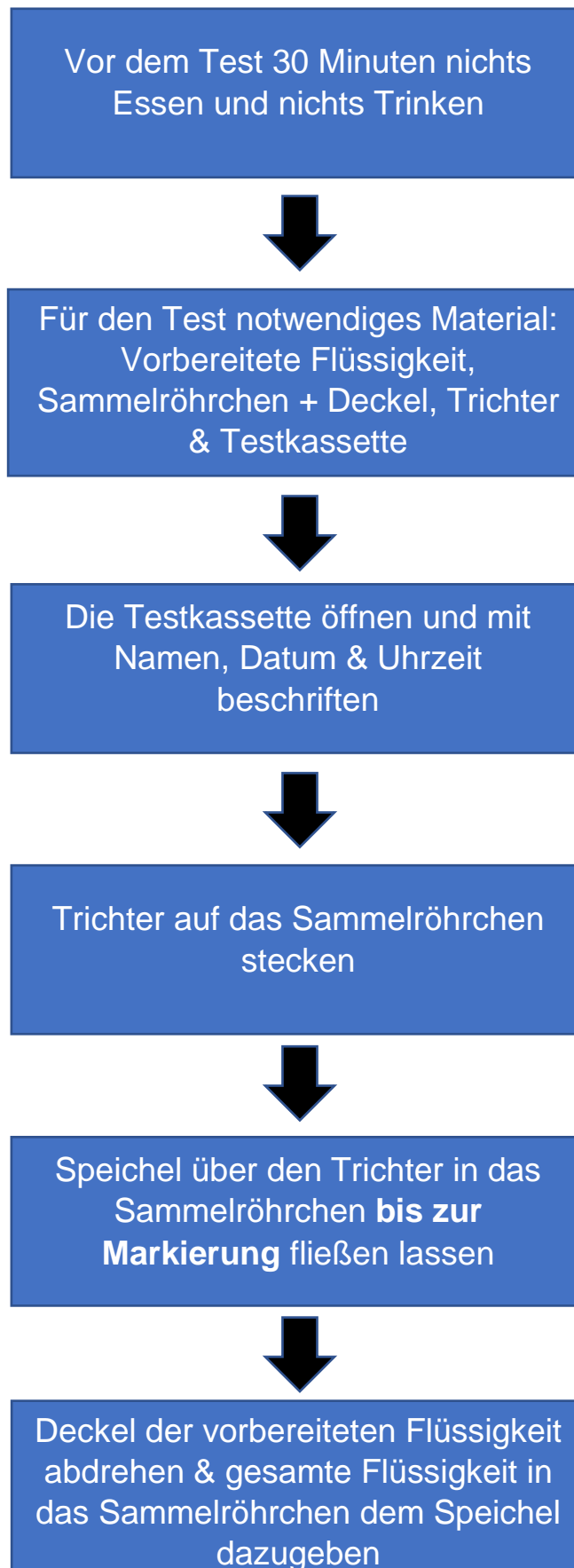



Trichter vom Sammelröhrchen entfernen & Sammelröhrchen mit dem Verschlussdeckel verschließen



Speichel & Flüssigkeit durch kreisende Bewegungen vermischen für 10 Sekunden



3 Tropfen aus dem Probeentnahmeröhrchen über den Verschlussdeckel auf den Test (Bereich S) geben



Teststreifen verfärbt sich rötlich



Auf dem Teststreifen sind 2 Bereiche: C = Kontrollbereich & T = Testbereich



Ablesen des Testes nach **15 Min.**  
C = Kontrollbereich muss eine Linie erscheinen. Test = gültig



Erscheint bei C & T eine Linie ist der Test positiv = **Corona positiv**

Erscheint nur bei C eine Linie = **Corona negativ**


Erscheint nur bei T eine Linie oder **keine** Linie  
**Test ungültig**



Abschließend auf der vorbereiteten  
Liste notieren, welches Kind  
getestet wurde. Kein Testergebnis  
notieren!

# Ablaufschema bei einem positiven Test

Dieses Ablaufschema stellt eine Unterstützung für Sie dar, wie mit einem positiven Testergebnis bei einem Schulkind zu Verfahren ist.

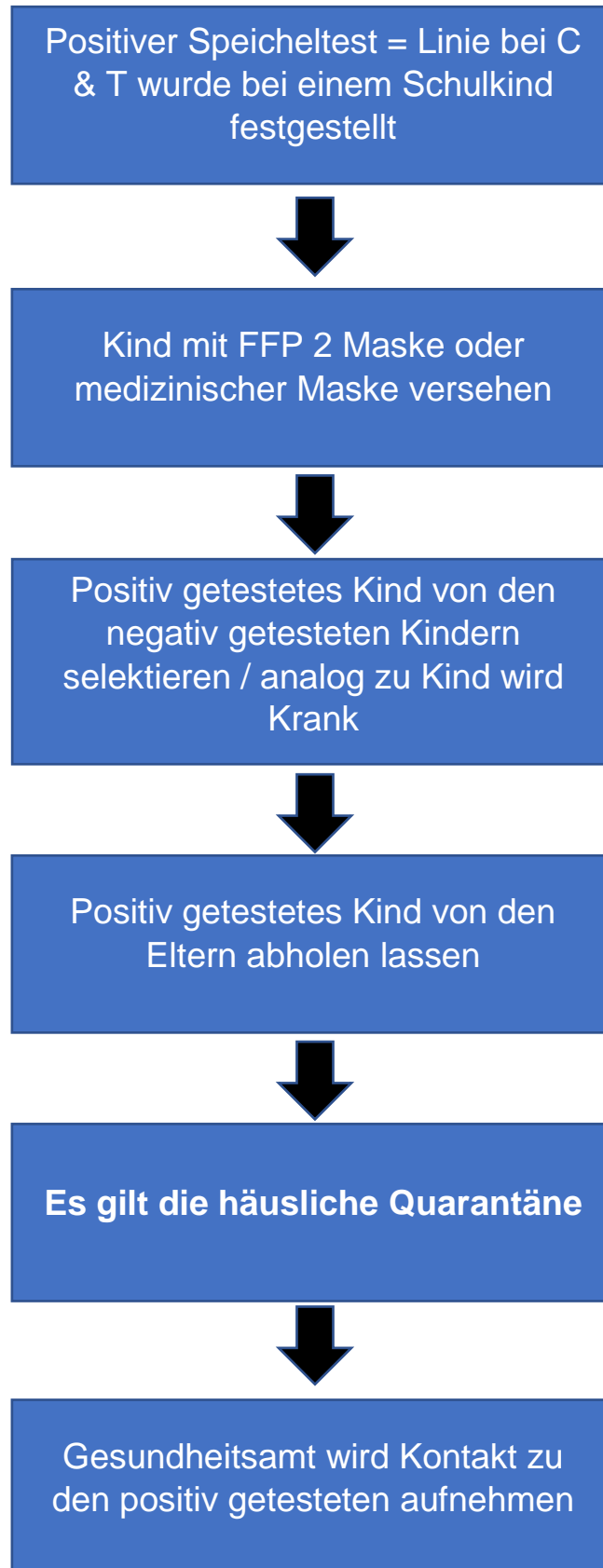

# Ablaufschema zur Meldung von positiven Testergebnissen an das Gesundheitsamt

Dieses Ablaufschema symbolisiert den Meldeweg, wie ein positives Testergebnis an das Gesundheitsamt weitergemeldet werden soll.

